

## قابل توجه سرپرستاران و مسئولین کلیه واحدها / بخشها:

### دستورالعمل نحوه استفاده صحیح از ظروف ایمن (SAFETY BOX)

روش دفع وسایل نوک تیزو ، سرنگ و سوزنهای مصرف شده :

- مراقب باشید تا هنگام کار کردن یا دفع وسایل نوک تیز آسیبی به شما وارد نشود.
- از در پوش گذاری مجدد و دستکاری کردن سوزن های مصرف شده خودداری کنید.
- به هیچ وجه نوک سوزن را بطرف بدن افراد دیگر نگیرید.
- با دست خود سوزن مصرف شده را از سرنگ یکبار مصرف جدا یا خم نکنید یا آنرا نشکنید.
- سرنگ های یکبار مصرف و سوزن های تیغه های اسکالپل و سایر وسایل نوک تیز مصرف شده را در ظروف مناسب و مقاوم به سوراخ شدگی (SAFETY BOX) قرار دهید.

روش استفاده از ظروف ایمن (SAFETY BOX):

- حجم ، اندازه و تعداد ظروف ایمن متناسب با نیاز بخش در نظر گرفته شود.
- از قرار دادن ظرف ایمن روی زمین خودداری گردد.
- لازم است ظرف ایمن روی دیوار یا تراسی درون حلقه مخصوص نگهداری نصب گردد.
- از ریختن سایر زباله در داخل ظرف ایمن خودداری گردد.
- محل نصب ظرف ایمن در جایی آزاد و به دور از سایر وسایلی از قبیل پریز برق ، سینک و زوایای اتاق باشد.
- بیش از  $\frac{3}{4}$  حجم ظرف پر نشود.
- ظروف ایمن به محض پر شدن ، جهت دفع نهایی به اتاق امحا فرستاده شود .
- قبل از فرستادن به محل دفع درب ظروف باید کاملاً بسته شوند.
- درب (قرمز رنگ) ظروف ایمن بایستی در هنگام نصب و قبل از استفاده کاملاً روی بدنه (زرد رنگ) محکم شوند.
- ظروف ایمن بعد از پر شدن نباید باز یا خالی شوند و یا مورد استفاده مجدد قرار گیرند .
- ظروف ایمن پر شده را نباید در دست گرفته یا تکان داده یا فشرده شوند.

کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی